


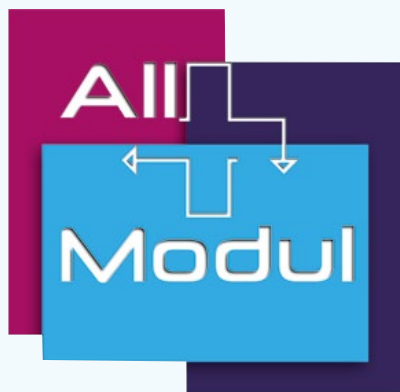

Solutions de verrouillage *Manuelles ou technologiques RFID*



Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

Solutions de verrouillage d'All Modul

All Modul offre différentes possibilités pour protéger mécaniquement, aussi bien que de manière électronique, l'accès aux chariots à pansements, aux armoires de laboratoire, à médicaments, à documents et à vêtements, aux casiers et boîtes aux lettres internes.

Les différentes sortes de verrouillage qu'offre All Modul peuvent s'appliquer à nos armoires, chariots et nombre d'autres accessoires modulaires et en lien avec la médecine.




Les verrous mécaniques peuvent s'ouvrir et se fermer avec :

- ✓ **Clé**
Verrou à clé, pour lequel un passe-partout est possible dans certains cas.
- ✓ **Code numérique (rotatif)**
Bouton rotatif avec code numérique via des cadrans.
- ✓ **Code PIN**
Après avoir entré un code PIN, le verrou peut se tourner et s'ouvrir.
- ✓ **Verrou à scellé**
Après avoir rompu le joint en plastique, le verrou s'ouvre.

Les verrous électroniques peuvent s'ouvrir et se fermer avec :

- ✓ **Code PIN**
Après avoir entré le code PIN, le verrou s'ouvrira.
- ✓ **Combinaison du code PIN et des cartes personnalisées (Mifare)**
Après avoir entré un code PIN et en tenant la carte personnalisée, dotée de la technologie RIFD, à côté du verrou, le verrou s'ouvre.


Table des matières et tableau des symboles

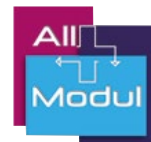

	Armoires ①	Chariots aluminium ②	Chariots à tiroirs ③	Cassettes à médicaments ④	Tiroirs à stupéfiants ⑤	Coffres à médicaments ⑥
Verrous mécaniques						
Verrous à clé DOM	Page 4					
Verrou à clé pour armoire à volet roulant	Page 4					
Divers verrous à clé		Page 5	Page 5	Page 6	Page 6	Page 6
Verrou à scellé	Page 7		Page 7		Page 7	Page 7
Verrou à code avec cadran mécanique	Page 7		Page 7			
Verrou mécanique à code PIN (2210)	Page 7					
Verrous électroniques						
Verrou électronique KL1000 à code PIN	Page 8	Page 8	Page 8		Page 8	Page 8
Verrou électronique CompX Regulator à code PIN				Page 8		
Verrou électronique LS400 à code PIN/mifare	Page 10	Page 10	Page 10	Page 10	Page 10	Page 10



①

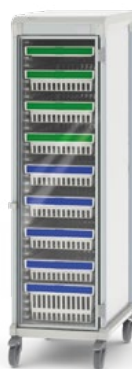

②



③



④



⑤



⑥



Symboles tableau

Dans cette brochure, vous trouverez, pour chaque verrou, le symbole d'un produit All Modul, sur lequel le verrou peut être monté.

- ① Armoires
- ② Chariots aluminium
- ③ Chariots à tiroirs
- ④ Cassettes à médicaments
- ⑤ Tiroirs à stupéfiants
- ⑥ Coffres à médicaments

Verrous mécaniques à clé

Armoires

Tout ce qu'il faut savoir

Nettoyage

Nettoyer à la main avec des produits de nettoyage au PH neutre.

Clés supplémentaires

Un passe-partout est disponible pour la plupart des verrous à clé que nous livrons.

Il est également possible de commander des clés séparées.

Consultez-nous sur cette possibilité pour votre verrou.

Légende des symboles

- ❶ Armoires
- ❷ Chariots aluminium
- ❸ Chariots à tiroirs
- ❹ Cassettes à médicaments
- ❺ Tiroirs à stupéfiants
- ❻ Coffres à médicaments

N° d'art. 413000031

Verrou à clé DOM pour porte avec ouverture droite


Application combinée ❶

N° d'art. 413000041

Verrou à clé DOM pour porte avec ouverture gauche

Application combinée ❶

Il faut sortir la clé, aussi bien en position fermée qu'ouverte. Deux clés standard sont fournies.

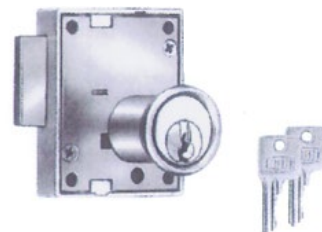

N° d'art. 413000131

Verrou à clé DOM pour porte avec ouverture droite et fermeture à trois points

Application combinée ❶


N° d'art. 413000141

Verrou à clé DOM pour porte avec ouverture gauche et fermeture à trois points

Application combinée ❶

Le verrou DOM avec système de tiges est destiné à une fermeture à trois points.

Il faut sortir la clé, aussi bien en position fermée qu'ouverte. Deux clés standard sont fournies.

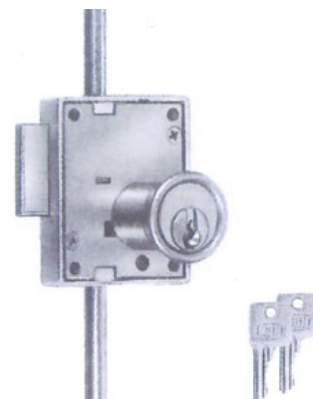

N° d'art. 413000061

Verrou à clé pour armoire à volet roulant


Application combinée ❶

Verrou à fermeture automatique.
1 jeu de 2 clés par verrou est livré.



Verrous mécaniques à clé

Chariots

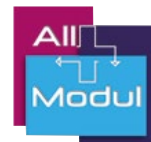

N° d'art. 230000029

Verrou standard à clé pour fermeture centrale d'un chariot à tiroirs

Application combinée ③

Le chariot à tiroirs est pourvu d'un verrou standard, qui s'utilise avec des clés.

1 jeu de 2 clés par chariot est livré.



N° d'art. 230000030

Serrure à clé pour chariots en aluminium

Application combinée ②

La serrure à clé peut être utilisée sur les chariots à volet roulant comme les chariots avec portes.

1 jeu de 2 clés par chariot est livré.



Tout ce qu'il faut savoir

Nettoyage

Nettoyer à la main avec des produits de nettoyage au PH neutre.

Clés supplémentaires

Un passe-partout est disponible pour la plupart des verrous à clé que nous livrons.

Il est également possible de commander des clés séparées.

Consultez-nous sur cette possibilité pour votre verrou.

Légende des symboles

- ① Armoires
- ② Chariots aluminium
- ③ Chariots à tiroirs
- ④ Cassettes à médicaments
- ⑤ Tiroirs à stupéfiants
- ⑥ Coffres à médicaments

Verrous mécaniques à clé

Tout ce qu'il faut savoir

Nettoyage

Nettoyer à la main avec des produits de nettoyage au PH neutre.

Clés supplémentaires

Un passe-partout est disponible pour la plupart des verrous à clé que nous livrons.

Il est également possible de commander des clés séparées.

Consultez-nous sur cette possibilité pour votre verrou.

Verrou de réserve pour cassette à médicaments

Un verrou de réserve pour la cassette à médicaments est appliqué lorsque la cassette est équipée d'un verrou électronique à code. Si, malencontreusement, le verrou à code n'est plus alimenté en électricité, le verrou de réserve permet d'ouvrir la cassette à médicaments.



Légende des symboles

- ① Armoires
- ② Chariots aluminium
- ③ Chariots à tiroirs
- ④ Cassettes à médicaments
- ⑤ Tiroirs à stupéfiants
- ⑥ Coffres à médicaments

N° d'art. 11180651

Verrou standard à clé pour fermeture centrale de cassettes à médicaments

Application combinée ④

Le verrou s'utilise avec des clés.
1 jeu de 2 clés par cassette est livré.



N° d'art. 418000002

Verrou à clé pour tiroirs à stupéfiants

Application combinée ⑤

Le verrou à clé est livré avec un jeu de deux clés.



N° d'art. WG-L


Verrou à clé pour coffres à médicaments

Application combinée ⑥

Le verrou à clé est livré avec un jeu de deux clés.



Autres verrous mécaniques

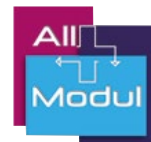

N° d'art. 230000024

Verrou à scellé

Application combinée ① ③ ⑤ ⑥

Le verrou standard peut être remplacé par le système présenté, spécialement pour la fermeture par joint de rupture d'un chariot de réanimation par exemple.

Après avoir rompu le joint de rupture, le verrou s'ouvre.

Le joint de rupture (n° d'art. 1410030), un contrôle visuel de la fermeture du verrou central est possible.



N° d'art. 230000028

Cadran mécanique avec verrou à code 3 chiffres intégré

Application combinée ① ③

Bouton rotatif avec code numérique pour trois cadrons.



N° d'art. 413000051

Verrou mécanique à code PIN 2210

Application combinée ①

L'entrée d'un code numérique donné permet d'ouvrir le verrou, grâce à un mécanisme non électronique.



Verrou électronique à code

Codelocks KL1000

Tout ce qu'il faut savoir

Nettoyage

Nettoyer à la main avec des produits de nettoyage au PH neutre.

Ouvrir

L'utilisateur final doit entrer le code PIN manuellement.

Programmation

Le code PIN des deux verrous s'introduit manuellement par l'utilisateur final.

L'ouverture du verrou KL1000 dégage le bouton de programmation rouge.

Est livré avec

2 piles alcalines AAA

KL1000 verrou de secours

Les verrous KL1000 ont une fermeture de secours par clé. Cette clé est à commander séparément (N° d'art. 230000003KEY).

Légende des symboles

- ① Armoires
- ② Chariots aluminium
- ③ Chariots à tiroirs
- ④ Cassettes à médicaments
- ⑤ Tiroirs à stupéfiants
- ⑥ Coffres à médicaments

Verrou électronique à code PIN

33 x 136 x 28 mm (H x l x P)

Le Codelocks KL1000 est un verrou à code PIN avec système de programmation par touches uniquement. La durée de vie des 2 piles AAA incluses est de $\pm 100\,000$ utilisations. Les batteries peuvent être facilement remplacées par l'avant.

N° d'art. 230000003

Codelocks KL1000 pour utilisation sur chariots, tiroirs à stupéfiants et coffrets à médicaments

Application combinée ② ③ ⑤ ⑥

Variante de montage horizontale - à droite.

N° d'art. 413000050

Codelocks KL1000 pour utilisation sur les armoires

Application combinée ①

Variante de montage verticale.



Verrou électronique à code PIN pour cassettes médicales

138 x 38 x 30 mm (H x l x P)

Le CompX Regulator est un verrou à code PIN avec programmation à touches. La durée de vie des 2 piles AAA incluses est de $\pm 75\,000$ utilisations. Les batteries peuvent être facilement remplacées par l'avant.

Art. nr. 230000333

CompX Regulator pour cassettes médicales modulaires


Application combinée ④

Variante de montage verticale.



Verrou à code électronique de Schlagbaum®

Systeme électronique de fermeture et d'identification

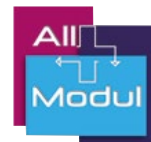

Système électronique de fermeture et d'identification

Un verrou électronique à code de Schlagbaum facilite l'identification et le verrouillage électroniques.

Le verrou design sans câble rend l'organisation de systèmes électroniques simple et confortable.

Les verrous à code Schlagbaum conviennent, de par leur construction compacte, à nombre de nos gammes de produits. Les systèmes de badges intégrés pour collaborateurs et patients sont largement possibles sur ces verrous Schlagbaum LS400.



Un code PIN personnel peut être entré aisément en effleurant les cases. Si on utilise un support de données RFID, il suffit de tenir  le support de données devant le champ de lecture. L'ensemble des technologies RFID peut être livré selon la norme ISO 14443 A (par exemple Mifare).

De plus, il existe un grand nombre de possibilités d'utilisation et d'organisation, par lesquelles l'autorisation d'accès est organisée encore plus efficacement. On peut gérer la plupart des différents groupes d'utilisateurs et vous pouvez à tout moment adapter de manière optimale votre système de fermeture aux diverses circonstances. Pensez aussi à différents numéros de série par emplacement d'établissement. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller au sujet de toutes les possibilités.

Quelques caractéristiques d'un verrou électronique à code Schlagbaum

- ✓ Les portes d'armoires, préparées pour les verrous standard à came usuels, peuvent facilement être équipées des technologies innovantes RFID et du code PIN. Grâce à la combinaison unique du code PIN et de la technologie RFID sans contact, il vous est aisé d'organiser différents niveaux de sécurité et groupes d'utilisateurs.
- ✓ Bouton rotatif pour une plus grande fonctionnalité en toute sécurité. Le bouton rotatif garantit le bon fonctionnement du verrou, également pour les portes et tiroirs d'armoires à verrouillage. Vous pouvez voir, au marquage vert du bouton, si le verrou est ouvert ou fermé.
- ✓ Intégration : Les verrous à code Schlagbaum sont adaptés à l'intégration dans des systèmes de données.
- ✓ Suivi des envois : à l'aide de la lecture des données, toutes les actions de verrouillage peuvent être suivies. Ceci veut dire que tous les utilisateurs fixent chaque opération de programmation ou d'ouverture et de fermeture, y compris l'heure de l'opération, dans une base de données.
- ✓ Lecture des données de mémoire, protocoles de fermeture pour 500 actions de verrouillage.
- ✓ Programmation de la fermeture automatique à partir de 60 secondes.
- ✓ Intervalle de blocage contre les tentatives d'ouverture non autorisées.
- ✓ Degré de protection IP43 selon la norme DIN EN 60529.

Les verrous à code innovants de Schlagbaum sont prédominants depuis plus de dix ans dans le domaine des systèmes de fermeture électroniques haut de gamme pour, entre autres, des armoires bénéficiant de la technologie RFID. Le système électronique de fermeture et d'identification offre une solution simple pour la sécurité de vos armoires médicales, chariots et produits modulaires médicaux.



Plus à savoir

Position ouverte et fermée pour un signalement visuel


Nous employons les positions standard suivantes du bouton rotatif :

Le bouton rotatif en position verticale signifie verrou fermé.

Le bouton rotatif en position horizontale signifie verrou ouvert.

Indépendamment de la position du verrou entier, cadran compris.

Voir les illustrations ci-dessous pour les positions verticales et horizontales du verrou entier.

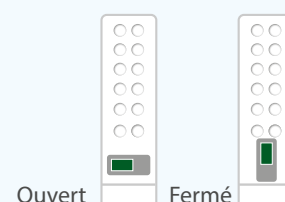

Possibilités d'organisation

Pour un tableau des possibilités d'organisation du verrou électronique à code LS400 de Schlagbaum, veuillez consulter notre site web.

Pour toutes les informations, voir :

**allmodul.fr/
verrou-electronique**

Verrou électronique à code

LS400

Tout ce qu'il faut savoir

Préprogrammé

Nous livrons les verrous LS400 avec les paramètres requis. Nous préprogrammerons ces paramètres.

Nettoyage

Nettoyer à la main avec des produits de nettoyage au PH neutre.

Ouvrir

- > L'utilisateur final doit entrer un code PIN manuellement.
- > Avec carte personnalisée RFID.

Programmer avec

- ✓ Porte-clés
- ✓ Clés de système
- ✓ Communicateur
- ✓ Logiciel Lockmanager

Est livré avec

Jeu de 3 piles au lithium AAA + connecteur.

Durée de vie des piles

Durée de vie d'une pile au lithium : 3 ans, à raison de 50 fermetures par jour/
± 50 000

(N° d'art. LSBATLI)

Légende des symboles

- ① Armoires
- ② Chariots aluminium
- ③ Chariots à tiroirs
- ④ Cassettes à médicaments
- ⑤ Tiroirs à stupéfiants
- ⑥ Coffres à médicaments

Verrou électronique à code LS400

151 x 38 x 33 mm (HxLxP)

Ouvrir avec :



Code PIN



Carte RFID

Programmer avec :



Porte-clés



Clés de système



Communicateur



Version gauche - horizontale

Application combinée ② ③ ⑤

Couleur blanche : N° d'art. LS400DHW

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous la fournir en noir.



Version verticale

Application combinée ① ④

Couleur blanche : N° d'art. LS400BVW

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous la fournir en noir.



Version droite - horizontale


Application combinée ⑥

Demandez-nous de vous montrer les possibilités pour cette version droite du verrou LS400.



Verrou électronique à code

Besoins de programmation pour un petit nombre d'utilisateurs

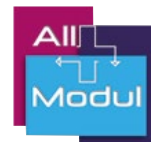

Programmation avec porte-clés (clés en pendentif)

Un kit de base et un kit d'extension de porte-clés sont disponibles. Le support peut par exemple être mis à la disposition des cadres d'un service pour des paramétrages au jour le jour. Le kit d'extension peut être, entièrement ou partiellement, mis à la disposition des responsables en dernier ressort de la gestion des clés.

Le kit de base permet de programmer la fonction la plus élémentaire :

✓ Insérer une nouvelle carte ou un nouveau code PIN.

Le kit d'extension permet d'exécuter les fonctions suivantes :

- ✓ Mettre le verrou en mode programmation pour pouvoir utiliser d'autres porte-clés de ce kit ou la carte de programmation du temps de fermeture.
- ✓ Réinitialisation des paramètres d'usine.
- ✓ Ouvrir et fermer avec Masterkey.

Pour programmer le temps de fermeture automatique, une carte de programmation livrée séparément est nécessaire (N° d'art. **LS400ST**). Pour cette carte, nous pouvons programmer le temps de fermeture souhaité. Le temps de fermeture peut être programmé à partir d'1 minute et jusqu'à 60 minutes.



Kit de base de programmation Schlagbaum série 400

Porte-clés pour les possibilités de programmation les plus communes des verrous électroniques à code Schlagbaum série **400**.

Cela permet d'insérer un nouveau code PIN ou une carte utilisateur RFID au verrou.

N° art. **LS400PSA**

2 porte-clés pour la programmation d'un verrou **LS400**

Comprend les porte-clés suivants :

1 x FixCode (vert), 1 x FixKey (vert)

Un porte-clés de rechange livré séparément est disponible (N° d'art. **LS400KF**).



Extension du kit de programmation Schlagbaum série 400

Porte-clés (trousseaux) pour des possibilités de programmation élargies des verrous électroniques à code Schlagbaum série **400**.

N° art. **LS400PS**

3 porte-clés pour la programmation d'un verrou **LS400**

L'extension du kit de programmation comprend les porte-clés suivants :

1 x MasterKey 2

1 x ResetKey

1 x Fix INIT ALL

Un porte-clés de rechange livré séparément est disponible (N° d'art. **LS400KF**).

Pour programmer le temps de fermeture, une carte de programmation est disponible (N° d'art. **LS400ST**).

Tout ce qu'il faut savoir

Notre conseil : utiliser uniquement des porte-clés pour un maximum de 10 verrous et de 20 utilisateurs.

Si le nombre de verrous et/ou d'utilisateurs augmente, alors la gestion de l'ajout et de la suppression des codes nécessite plus de travail avec les porte-clés qu'avec l'utilisation du logiciel avec les cartes de programmation (voir clés système page 24). Outre le logiciel et les cartes, d'autres fonctionnalités sont disponibles.

Si le verrou a un code PIN et une fonction de lecture de carte, alors les deux possibilités d'accès doivent être programmées séparément avec les jeux de porte-clés correspondants. D'ailleurs cela peut être réalisé en 1 action au moyen de la programmation logicielle.



Verrou électronique à code

Besoins en programmation pour un grand nombre d'utilisateurs

En savoir plus

Exigences du système


Il faut installer le logiciel Lockmanager Schlagbaum sur les systèmes d'exploitation suivants :
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10

N° art. LSPSYSKEY

Clés système de kit de programmation LS

Cartes RFID avec le logiciel Lockmanager

Cartes pour des possibilités de programmation élargies du verrou électronique à code **LS400**. Dans ce cas, utilisez le logiciel Lockmanager voulu et toujours le lecteur de bureau LS.

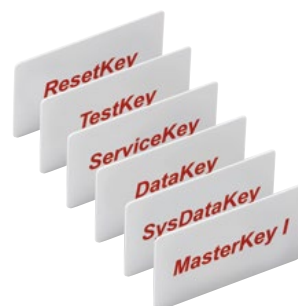

N° art. LSSOFT1

Logiciel LS LM 200

Logiciel simple sans lecture de données

N° art. LSSOFT2

Logiciel LS LM6K

Logiciel élargi avec lecture de données

Logiciel à utiliser pour le verrou électronique à code **LS400** allant de pair avec le lecteur de bureau ou le communicateur LS.



N° d'art. LSUSB

Lecteur de bureau USB LS

Pour la programmation de clés de système et d'autres radio-étiquettes.

Lecteur de bureau, pour lire ou programmer les clés système ou quelques autres supports de données RFID (avec possibilité de Mifare DESFire). L'appareil est alimenté en courant via le port USB.



N° d'art. LSCOM

Communicateur LS

Pour la programmation de systèmes de fermeture RFID

Système de programmation des données tout en 1 entrant et sortant.



N° art. LSCARD


Carte d'utilisateur vide

Une nouvelle carte utilisateur non-écrite pour l'utilisation avec un verrou électronique à code **LS400**. Compatible avec Mifare 1K.



Verrou électronique à code

Remplacement des piles

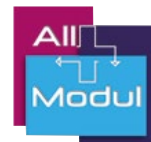

N° d'art. LBSATLI
[LS jeu de piles au lithium](#)

Durée de vie 5 ans ou 50 000 actionnements au total.



N° art. LSBATTOOL
[Outil de remplacement des piles LS](#)

Kit avec tournevis Torx T6 et pince de retrait de la prise de batterie.

S'utilise avec le verrou électronique à code **LS400**.



N° d'art. LSKNOB
[Jeu de boutons rotatifs carrés de rechange](#)

Ensemble de 10 unités.
Pour le changement d'un bouton rotatif, vous pouvez passer en revue les étapes, ainsi que pour le changement des piles. Le bouton rotatif lui-même peut être dévissé à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Tout ce qu'il faut savoir

Notice de montage

Consultez notre site web pour les actions de montage et de remplacement des piles les plus actuelles.

www.allmodul.fr/téléchargements

LSW400

Avez-vous un verrou à code LSW400 ? Peut-être avons-nous les pièces de rechange qui vous intéressent.

Ne plus changer les piles d'un verrou électronique à code ?

Dans le cas où un verrou est monté sur un chariot avec source de courant, il est souvent possible d'effectuer un couplage pour l'alimentation en électricité.

Résultat ?

[Ne changez plus vos piles !](#)

Boutons ronds

Des boutons ronds sont également possibles sur demande.



Verrou électronique à code

Montage LS400


Tout ce qu'il faut savoir

Montage de l'armoire existante

Lorsque une armoire existante possède déjà un verrou à clé, il est facile de changer celui-ci pour un verrou à code Schlagbaum. Le mécanisme et le logement du verrou se montent remarquablement bien. Un modèle de forage est disponible.

Laissez-nous vous conseiller !

Appelez le
+32 57 280 116
ou le **+33 328 501 840**

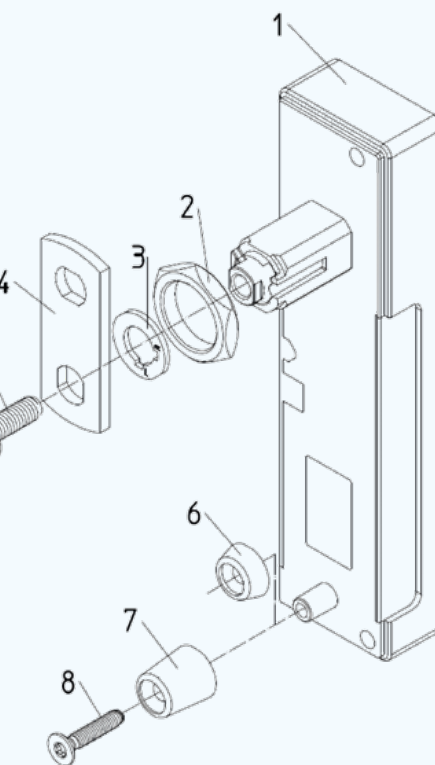

N° art. LSMK

Montage du verrou Schlagbaum LS400 pour armoire

Comprend le matériel de montage



N° d'art. LSMW

Montage du verrou Schlagbaum LS400 pour chariots

Comprend la tringlerie MK3 + le connecteur Schlagbaum AM



N° d'art. LSMO

Montage du verrou Schlagbaum LS400 pour tiroir à stupéfiants

Comprend le matériel de montage



N° d'art. LSMM

Montage du verrou Schlagbaum LS400 pour cassette médicale

Comprend le matériel de montage




Téléchargez les brochures actualisées de nos gammes de produits.

www.allmodul.fr/téléchargements




Le verrou à code Schlagbaum en pratique

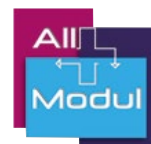

90 chariots à médicaments pour Erasmus MC (Rotterdam, Pays Bas), pourvus de verrous électroniques à code Schlagbaum

- ✓ Nous installons les verrous à code. Tous les verrous sont numérotés et préprogrammé selon les désirs de l'hôpital.
- ✓ Chaque chariot à médicaments porte un numéro unique auquel sont connectés tous les composants. Ceci facilite la maintenance.

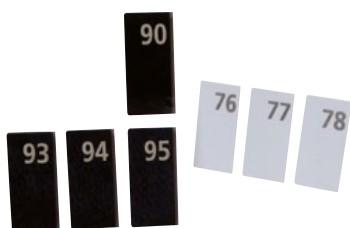

N° d'art. LSPLATES Verrous numérotés

Plaquettes à numéro unique pour les verrous à code Schlagbaum.

Idéales pour les moniteurs de chariots, armoires ou le produit de stockage équipé d'un verrou Schlagbaum.

Le logiciel Lockmanager Schlagbaum, ainsi que le système SLA peuvent insérer la numérotation.

En savoir plus

Solutions pour votre chaîne logistique de médicaments

Pour la distribution des médicaments dans un établissement de soins, la sécurité prévaut. Les verrous Schlagbaum pour nos chariots à médicaments ou les COW avec cassette pour médicaments sont particulièrement adaptés à cela.



Solutions pour votre chaîne logistique de médicaments



Chariots à tiroirs



Chariot informatique d'All Modul

N° d'art. LSTRAIN

Formation sur le logiciel LS

Durant la formation, assurée en permanence par l'un de nos spécialistes en produits IT, on vous familiarise étape par étape avec toutes les possibilités que le logiciel peut offrir.

Après cette formation, vous êtes à même de :

- ✓ compiler une base de données spécifique à l'établissement.
- ✓ associer les verrous aux personnels dans la base de données.
- ✓ associer les badges et/ou codes PIN aux verrous et aux personnels.
- ✓ installer toutes sortes de fonctions du verrou, telles que la durée de fermeture (le cas échéant).
- ✓ autoriser ou non l'ouverture et la fermeture simultanée de verrous par les utilisateurs.
- ✓ gérer simplement et facilement les verrous à l'aide de cartes de programmation des lecteurs de cartes USB.
- ✓ lire les 450 derniers protocoles et pouvoir les partager au moyen d'une exportation.
- ✓ répondre à la FAQ des utilisateurs finals.
- ✓ lire l'état de la batterie et un certain nombre de cycles.



Gestion des services All Modul

En combinaison ou pas avec un contrat de niveau de service, nous offrons la possibilité à nos clients d'utiliser notre outil ITSM de TOPdesk.

Nous pouvons y gérer les notifications que vous recevez, mais vous pouvez faire aussi vous-même des rapports et en suivre le statut à tout moment. Nous avons également mis dans le système d'information et de connaissance nombre de notices et de FAQ généralement conçues sur mesure.



Laissez-nous vous conseiller !

Appelez le +32 57 280 116

ou le +33 328 501 840

Coordonnées All Modul

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ypres
T : + 32 57280116
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T : + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

All Modul BV
Damzicht 13
3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl